


**INSIGNIA™**

**GUÍA DEL USUARIO**

# Sillón de masaje de cuerpo entero de gravedad cero

**NS-MGC300BK1 / NS-MGC300BN2**

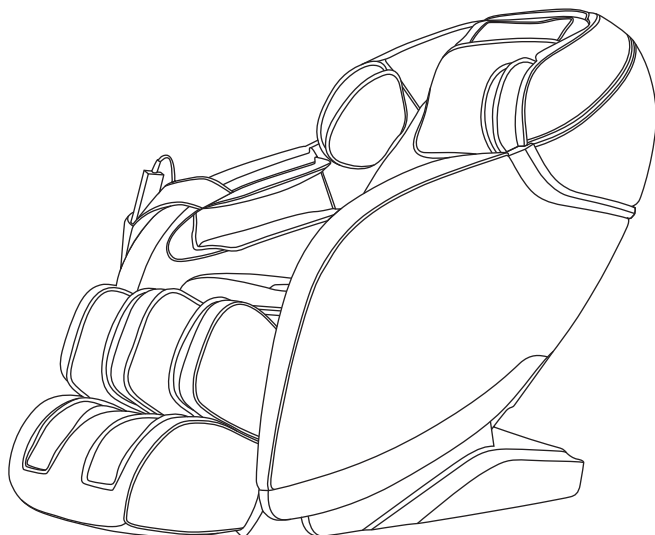

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

## Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....	3
MANTENIMIENTO .....	5
Características.....	5
Contenido del paquete.....	5
Componentes.....	6
Control remoto .....	8
Configuración de su sillón de masaje.....	9
Proporcionando la fuente de energía correcta.....	9
Elección de una ubicación.....	10
Para mover su sillón .....	11
Para colocar o quitar los cojines.....	11
Utilización de su sillón de masaje .....	12
Ejecución inicial de la exploración del cuerpo .....	12
Selección de un modo de masaje automático .....	13
Cómo crear un modo de masaje personalizado para la parte superior del cuerpo.....	13
Ajuste de las posiciones del respaldo y del reposapiés.....	14
Ajuste del temporizador.....	15
Selección de un modo de presión de aire .....	15
Utilización de otras opciones de masaje personalizadas .....	15
Apagado de la energía y detención del masaje .....	16
Localización y corrección de fallas.....	16
Especificaciones.....	18
Avisos legales .....	18
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO .....	19

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:**

Lea todas las instrucciones antes de usar (este electrodoméstico)

## **PELIGRO**–Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Desenchufe siempre este aparato del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- Manténgalo seco - No lo utilice en condiciones de humedad.

**ADVERTENCIA**– Riesgo de colapso y lesiones graves. Carga máxima de 330 lb (150 kg).

## **ADVERTENCIA**–Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

- Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no se esté utilizando, antes de poner o quitar partes.
- Se necesita una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, personas con discapacidades o minus válidas.
- Utilice el aparato sólo para el uso indicado, tal como se describe en este manual. No utilice aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
- No transporte este aparato por el cordón de suministro ni utilice el cordón como asa.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y similares.
- Nunca deje caer o inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo use en exteriores.
- No operar en lugares donde se utilicen productos de aerosol o donde se administre oxígeno.
- Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- El aparato está destinado únicamente para uso doméstico y en interiores.
- Conecte este aparato solamente a un tomacorriente con conexión a tierra. Refiérase a **CONEXIÓN A TIERRA** en la página 4.
- Mantenga a los niños alejados del soporte para los pies extendido (u otras partes similares)
- No utilice el sillón de masaje cerca de ropa o joyas sueltas.
- Mantenga el cabello largo alejado del sillón de masaje mientras lo usa.
- Pueden producirse temperaturas lo suficientemente altas como para causar quemaduras, independientemente del ajuste del control. No se duerma en el sillón de masaje. El uso sin supervisión de la almohadilla térmica por parte de niños o personas incapacitadas puede ser peligroso. No utilizar en pieles sensibles o en personas con mala circulación sanguínea. Compruebe con frecuencia la piel que está en contacto con la zona calentada del aparato para reducir el riesgo de formación de ampollas.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o se rompe, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para que la corriente eléctrica reduzca el riesgo de una descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.

## PELIGRO: Conexión incorrecta a tierra del equipo

- Un conductor mal instalado puede dar lugar a un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico de servicio calificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto para que se ajuste al tomacorriente. Haga que un electricista calificado le instale un tomacorriente adecuado.
- Este producto es para ser usado en un circuito nominal de 120 V, y tiene un enchufe con conexión a tierra. Refiérase a [Proporcionando la fuente de energía correcta](#) en la página 2. Si no tiene un enchufe con conexión a tierra, puede usar un adaptador temporal de 2 polos. Refiérase a [Proporcionando la fuente de energía correcta](#) en la página 2. Utilice el adaptador temporal sólo hasta que un electricista calificado instale un enchufe debidamente conectado a tierra. Mientras se usa un adaptador temporal, el conector rígido de color verde, la lengüeta o similar que se extiende desde el adaptador debe estar conectado a una toma de tierra permanente, como una tapa de caja de enchufe debidamente conectada a tierra. Siempre que se use el adaptador, debe ser sujetado en su lugar por un tornillo de metal.

## CUIDADO - Por favor, lea todas las instrucciones

### cuidadosamente

#### Antes de operar.

- Este producto no está destinado para el uso médico. Sólo está destinado para proporcionar un lujoso masaje.
- Consulte a su médico antes de usar este producto, si
  - Está embarazada
  - Tiene un marcapasos
  - Usted tiene alguna preocupación con respecto a su salud
- No se recomienda que sea utilizado por los niños.
- NUNCA deje el aparato desatendido, especialmente si hay niños presentes.
- NO use este producto por más de 30 minutos a la vez.
- El uso extensivo podría llevar a un calentamiento excesivo del producto y a una vida más corta. En caso de que esto ocurra, interrumpa el uso y deje que la unidad se enfríe antes de ponerla en funcionamiento.
- NUNCA use este producto directamente sobre áreas inflamadas o erupciones de la piel.
- NO utilice este producto como sustituto de la atención médica.
- Este producto NUNCA debe ser usado por ningún individuo que sufra de alguna dolencia física que limite la capacidad del usuario para operar los controles o que tenga deficiencias sensoriales en la mitad inferior de su cuerpo.



Quando el reposapiés se esté moviendo hacia arriba, no lo presione. Su sillón de masaje puede inclinarse hacia adelante y causar daños o lesiones personales.



Antes de sentarse en el sillón de masaje por primera vez, encienda la unidad para permitir el posicionamiento adecuado de los rodillos de masaje.



Antes de sentarse en su sillón de masaje, asegúrese de que la mano de masaje está en el cojín del asiento. La mano de masaje está en la parte posterior del cojín en el lado del armazón del espaldar. De lo contrario, la mano puede causarle molestias o dañar el rodillo de masaje.



No tire del cable de control o del cable de alimentación cuando el sillón esté encendido o en modo de espera. Puede dañar su sillón o electrocutarse. Le recomendamos que desenchufe y guarde el cable y el cordón después de cada uso.



Para evitar daños a su sillón o lesiones personales, asegúrese de que no hayan niños o mascotas debajo del reposapiés y del respaldo cuando inicie la función de gravedad cero.



Mantenga a los niños y a las mascotas alejados de las partes móviles mientras su sillón entra y sale de una inclinación.

# MANTENIMIENTO

## ALMACENAMIENTO

Coloque el sillón de masaje en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la superficie del tejido. Para evitar que se rompa, no enrolle el cable de alimentación alrededor de la unidad. No cuelgue la unidad por el cable del control manual.

## LIMPIEZA

Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla. Limpie sólo con una esponja suave, ligeramente húmeda. Nunca permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad.

- NO se debe sumergir en ningún líquido para limpiar.
- NUNCA use limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, pulimento para vidrio/muebles o disolvente de pintura para limpiar.

## Características


- Seis programas únicos apuntan a áreas clave del cuerpo o cree manualmente su propio masaje ideal
- La combinación de rodillo y presión de aire proporciona el máximo confort y relajación
- El escaneo de la parte superior del cuerpo permite que el sillón se ajuste a sus medidas precisas
- La función de memoria le permite configurar, guardar y cargar un modo de masaje personalizado
- El calentamiento por infrarrojos ayuda a calmar los músculos doloridos
- La cubierta de cuero de poliuretano proporciona tanto comodidad como durabilidad
- El control remoto con cable facilita el ajuste de la configuración
- El apagado automático le ayuda a ahorrar electricidad y dinero
- Llega ensamblada y lista para usarse en minutos

## Contenido del paquete


- Sillón de masaje corporal completo de 2D
- Control remoto cableado
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

## Componentes

### Lado izquierdo

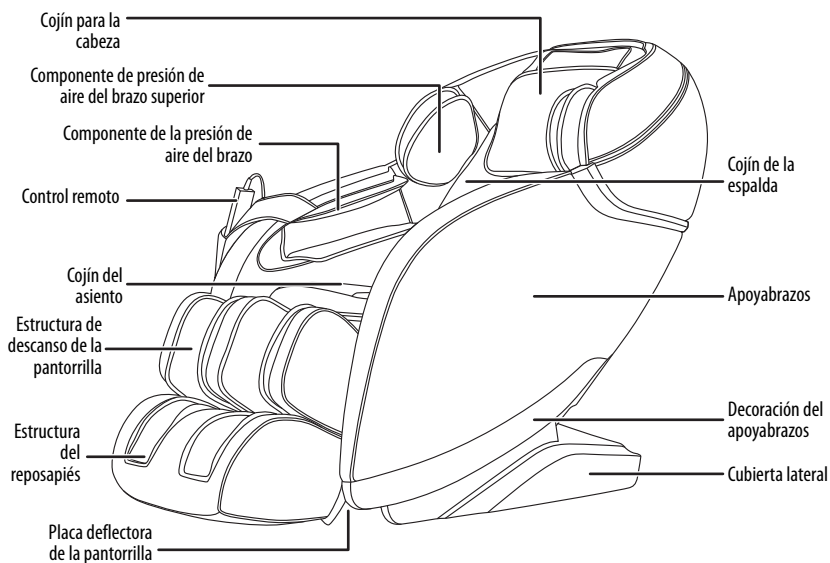


## Lado derecho

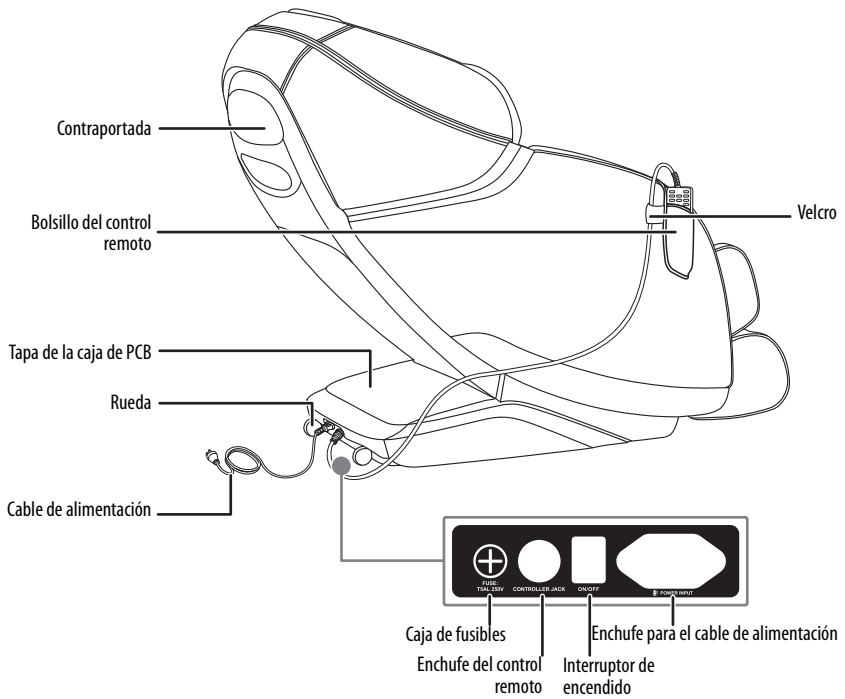



Para obtener más información, refiérase a la Guía de instalación rápida.

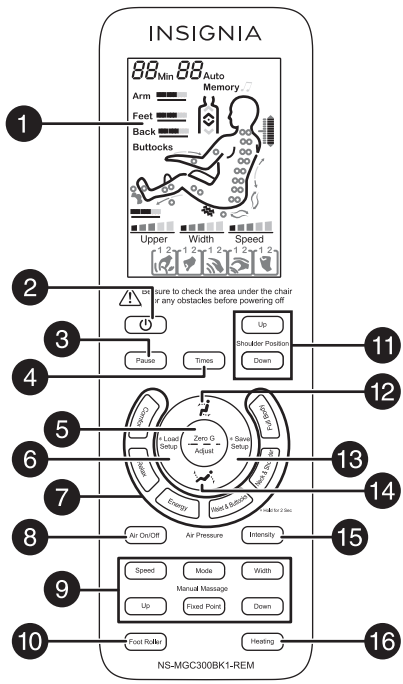Control remoto



N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Pantalla	Muestra la configuración actual de su sillón.
2	⏻ (encendido)	Activa o desactiva todas las funciones de masaje.
3	Pausar	Detiene o inicia las funciones de masaje. Refiérase a <u>Utilización de otras opciones de masaje personalizadas</u> en la página 15.
4	Veces	Establece la cantidad de tiempo que desea que su sillón de masajes. Cada pulsación añade cinco minutos. El tiempo máximo es de 30 minutos. Refiérase a <u>Ajuste del temporizador</u> en la página 15.
5	Cero G/Ajuste	Selecciona una posición de reclinado. Puede seleccionar una delas tres posiciones de reclinado.
6	Cargar configuración	Carga un modo de masaje personalizado. Refiérase a <u>Cómo crear un modo de masaje personalizado para la parte superior del cuerpo</u> en la página 13.




N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
7	Modos de masaje	Selecciona un modo de masaje pre-programado. Refiérase a <u>Selección de un modo de masaje automático</u> en la página 13.
8	Encendido/Apagado de la función de aire	Activa o desactiva la función de presión de aire. Refiérase a <u>Selección de un modo de presión de aire</u> en la página 15.
9	Masaje manual	Selecciona varios ajustes de masaje para crear un modo de masaje personalizado. Refiérase a <u>Cómo crear un modo de masaje personalizado para la parte superior del cuerpo</u> en la página 13.
10	Rodillo de pie	Activa o desactiva la función de rodillo de pie o ajusta la intensidad del rodillo de pie.
11	Posición del hombro	Ajusta las bolas de masaje de los hombros para el máximo confort. <b>Up</b> para subir las bolas. <b>Down</b> para bajar las bolas.
12	 (sentado)	Sube el espaldar y baja el reposapiés.
13	Guardar la configuración	Guarda un modo de masaje personalizado. Refiérase a <u>Cómo crear un modo de masaje personalizado para la parte superior del cuerpo</u> en la página 13.
14	 (reclinado)	Baja el espaldar y sube el reposapiés.
15	Intensidad	Selecciona la intensidad de la presión del aire. Refiérase a <u>Selección de un modo de presión de aire</u> en la página 15.
16	De la calefacción	Activa o desactiva la función de calefacción.

## Configuración de su sillón de masaje


### Proporcionando la fuente de energía correcta

#### Nota:

Al presionar  su sillón se apaga, pero su sillón sigue recibiendo energía. Para cortar la energía de su sillón, desenchufe el cable de alimentación.

- Debes conectar su sillón a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Su sillón está equipada con un cable de alimentación con un conector de conexión a tierra de tres clavijas para su uso en un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra.

- El tomacorriente debe estar correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

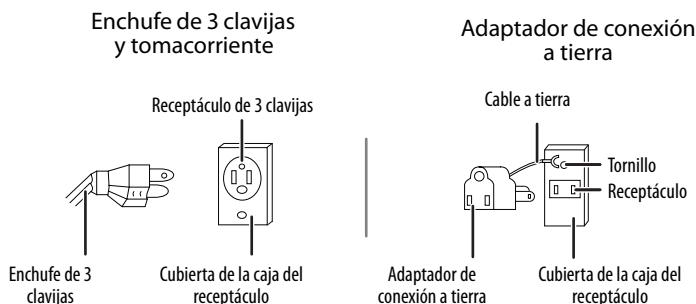


## Elección de una ubicación

### ADVERTENCIA:


- No mueva su sillón con sus ruedas sobre un suelo de madera, un terreno irregular o en un espacio estrecho.
- Se necesitan dos personas para levantar el sillón.
- Al transportar su sillón, use la placa deflectora de la pantorrilla y las ranuras de la cubierta del espaldar para levantar su sillón. No use los apoyabrazos para levantar su sillón.

- Si el lugar elegido es un piso de madera, coloque una alfombra o un material similar debajo de su sillón para proteger el piso de los daños.
- Asegúrese de que el lugar esté cerca de un tomacorriente con conexión a tierra.
- No deje que el cable de alimentación se extienda por el suelo para evitar tropiezos accidentales.
- No dejes que su sillón o cualquier otro artículo esté sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el espaldar esté al menos a 11 pulg. (27.5 cm) de la pared. De lo contrario, puede dañar la pared o su sillón cuando el espaldar esté reclinado.

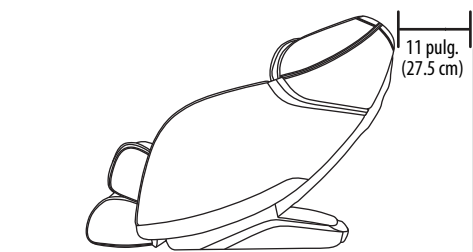

## Para mover su sillón

- 1 Apague su sillón, y luego desenchufe los cables de alimentación y el control remoto. Asegúrese de que los cables estén fuera de la trayectoria de movimiento.
- 2 Inclíne su sillón hacia atrás. El centro de gravedad debería estar en las ruedas.

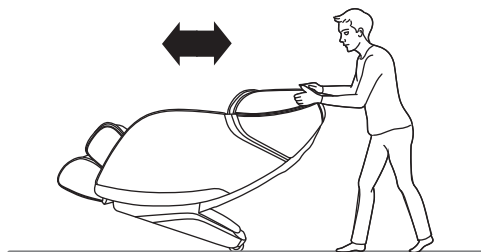

- 3 Empuje o tire de su sillón a su nueva ubicación, luego baje suavemente su sillón.
- 4 Vuelva a enchufar el cable de alimentación y el cable del control remoto.


## Para colocar o quitar los cojines

Su sillón tiene cojines desmontables para la cabeza y el espaldar.

El cojín para la cabeza le permite controlar la intensidad del masaje del cuello y los hombros. Si retira el cojín, la intensidad es más fuerte. (Recomendamos que use el cojín).


Un zíper sujeta el cojín al respaldo. El velcro sujeta el cojín del reposacabezas al cojín del respaldo.


**Nota:** Retiramos el tirador del zíper del cojín del respaldo para evitar que los niños se lo quiten.

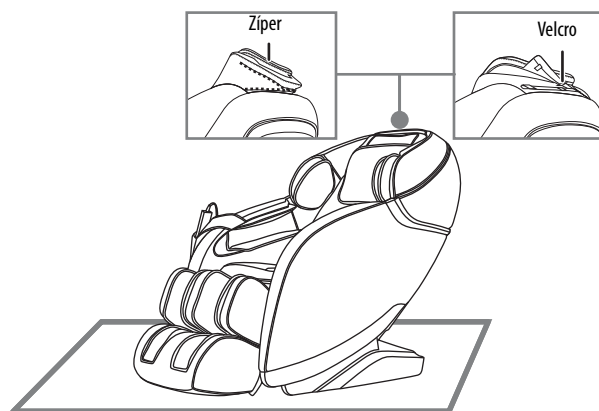

## Utilización de su sillón de masaje

### Ejecución inicial de la exploración del cuerpo

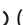- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente con conexión a tierra.
- 2 Extienda el reposapiés para acomodar la longitud de sus piernas, si es necesario.
- 3 Presione el botón  (encendido).  
Su sillón hace un escaneo del cuerpo y prueba la posición de sus hombros y los puntos de masaje. Cuando se completa la exploración, el icono de la posición del hombro aparece en la pantalla y su sillón emite un pitido.
- 4 Si el escáner corporal no reconoce la posición real del hombro, presione el botón **Shoulder Position Up** (posición del hombro hacia arriba o **Down** (Abajo) para ajustar manualmente la posición del hombro. Puede seleccionar entre 10 niveles. Tiene 10 segundos para hacer un ajuste. Después de 10 segundos, el masaje se inicia automáticamente.

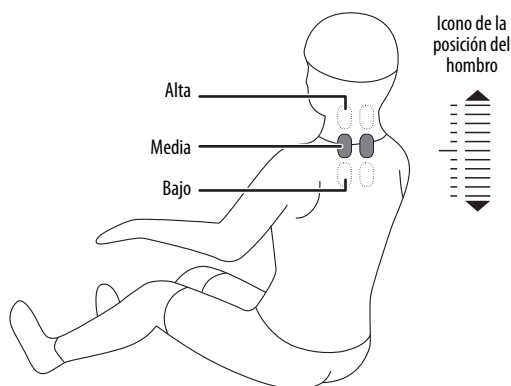

- 5 Presione uno de los botones de masaje automático para seleccionar un modo de masaje automático. Refiérase a [Selección de un modo de masaje automático](#) en la página 13.

## Selección de un modo de masaje automático






Su sillón tiene seis modos de masaje pre-programados.


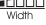
- Siéntese en su sillón y presione uno de los botones del modo de masaje. Puede presionar:






BOTÓN	DESCRIPCIÓN	PANTALLA REMOTA
<b>Confort</b>	Relaja los músculos.	F1 Automático
<b>Relajación</b>	El masaje de tejido profundo da masaje a los puntos clave de acupresión para relajar las zonas doloridas.	F2 Automático
<b>Energía</b>	Combina bolsas de aire y tácticas para un masaje corporal completo para despertar el cuerpo y ayudar a restaurar la energía corporal.	F3 Automático
<b>Cintura y glúteos</b>	Se centra en la zona de la cintura y los glúteos.	F4 Automático
<b>Cuello y hombro</b>	Se centra en las áreas del cuello y los hombros.	F5 Automático
<b>Cuerpo entero</b>	Masaje de cuerpo entero para relajar las áreas doloridas y rígidas.	F6 Automático

## Cómo crear un modo de masaje personalizado para la parte superior del cuerpo

- 1 Presione **Mode** una o mas veces para seleccionar un modo de masaje manual. Dependiendo del modo que haya seleccionado puede presionar **Speed** para ajustar la velocidad del masaje, **Width** para ajustar el ancho entre las dos bolas que dan el masaje o **Fixed Point** para ajustar la posición vertical de la bola de masaje.




MODO DE MASAJE	AJUSTES OPCIONALES	PANTALLA REMOTA
Shiatsu	Velocidad y anchura	
Amasar	Velocidad	
Golpecitos	Velocidad y anchura	
Amasar y golpecitos	Velocidad	
Masaje por golpe	Velocidad y anchura	

- 2 Presione **Speed** (Velocidad) una o más veces para ajustar la velocidad de masaje. Usted tiene cinco modos de velocidad para escoger.  aparece en la pantalla al mismo tiempo que ajusta la velocidad.
- 3 Presione **Width** (Ancho) una o más veces para ajustar el ancho de la bola de masaje. Tiene tres modos de ancho para escoger.  aparece en la pantalla al mismo tiempo que ajusta el ancho.
- 4 Presione **Fixed Point** (Punto fijo) una o más veces para ajustar el movimiento vertical de la mano. Tiene cinco movimientos de mano para escoger.

CONTROL	PANTALLA REMOTA
La mano de masaje se mantiene en <b>posición fija</b> .	 H0
La mano de masaje se mueve hacia arriba y hacia abajo en una posición <b>parcial</b> .	 H1
La mano de masaje se mueve hacia arriba y hacia abajo en toda la espalda.	 H2
La mano de masaje se mueve hacia arriba y hacia abajo en la zona de la espalda y los hombros.	 H3
La mano de masaje se mueve hacia arriba y hacia abajo en la espalda y la zona de la cintura.	 H4


- 5 *Opcional:* Si ha seleccionado el movimiento **fijo** o **parcial** de la **mano**, mantenga presionado **Up** (Arriba) o **Down** (Abajo) para mover el masaje hacia arriba o hacia abajo.
- 6 Para guardar el modo de masaje personalizado, mantenga presionado **Save Setup** (Guardar la configuración) por un segundo. Su sillón emite un pitido, y luego guarda su nuevo modo.
- 7 Para cargar su modo de masaje personalizado, mantener presionado **Load Setup** (Cargar configuración) por un segundo. Su sillón pita una vez, y luego carga sus ajustes en su nuevo modo.

### Ajuste de las posiciones del respaldo y del reposapiés

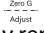- Mantenga presionado  para subir el respaldo y bajar el reposapiés al mismo tiempo. El control remoto hace un sonido para indicar que su sillón ha alcanzado las posiciones máximas, y esta función se apaga.
- Mantenga presionado  para bajar el respaldo y subir el reposapiés al mismo tiempo. El control remoto hace un sonido para indicar que su sillón ha alcanzado las posiciones máximas, y esta función se apaga.
- Presione  para seleccionar una de las tres posiciones automáticas de respaldo y reposapiés.

## Ajuste del temporizador

Usted puede seleccionar cuánto tiempo desea que dure el masaje. Al terminarse el tiempo, el masaje se detiene.

- Presione **Times** (Tiempo) una o más veces para seleccionar el tiempo. Cada vez que presiona este botón, su sillón agrega cinco minutos al tiempo. El tiempo predeterminado es de 20 minutos.  aparece en la pantalla cuando el tiempo está activado.





El tiempo máximo que puede establecer es de 30 minutos. Si presiona este botón después de que aparezca 30 en la pantalla, el tiempo cambia a 5 minutos.


Cuando se acaba el tiempo, el masaje se detiene y las manos vuelven a las posiciones predeterminadas. El respaldo y el reposapiés no vuelven a las posiciones predeterminadas.

## Selección de un modo de presión de aire


Su sillón utiliza bolsas de aire para apretar, y luego liberar, los músculos de sus brazos, piernas y pies para liberar la tensión muscular y mejorar el flujo sanguíneo.


- 1 Presiones **Air On/Off** (Aire activado/Desactivado) una o más veces para seleccionar un modo de presión de aire.


MODO DE PRESIÓN DE AIRE	PANTALLA REMOTA
La presión del aire masajea los brazos, las piernas y los pies.	Arm  Feet 
El masaje de presión de aire se centra en los brazos.	Arm 
El masaje de presión de aire se centra en las piernas y los pies.	Feet 

- 2 *Opcional:* Presione **Intensity** (Intensidad) para cambiar la intensidad de la presión de aire. Tiene tres modos de intensidad para escoger.  aparece en la pantalla al mismo tiempo que ajusta la intensidad.

## Utilización de otras opciones de masaje personalizadas

Presione **Foot Roller** (Rodillo de pie) para activar o desactivar el rodillo de pie.  aparece en la pantalla cuando esta opción está activada.

Presione **Heating** (Calefacción) para encender o apagar la calefacción infrarroja. Cuando esta opción está activada, alcanza el calor total en unos tres minutos.  aparece en la pantalla cuando esta opción está activada.

Presione **Pause** para pausar o reiniciar el masaje. Cuando pausa el masaje, se detiene el tiempo en la pantalla, pero el temporizador continúa la cuenta regresiva.  aparece en la pantalla cuando esta opción está activada.

## Apagado de la energía y detención del masaje

- En estado de funcionamiento, mantenga presionado el botón de encendido durante el masaje para detener todas las funciones de masaje inmediatamente. El respaldo y el reposapiés vuelven a las posiciones predeterminadas. Suelte el botón de encendido, el respaldo y el reposapiés dejan de moverse.
- Al terminarse el tiempo de masaje:
  - La mano de masaje vuelve a la posición predeterminada,
  - Todas las funciones de masaje se detienen,
  - El respaldo y el reposapiés no vuelven a las posiciones predeterminadas. Es necesario mantener presionado el botón de encendido para volver a la posición predeterminada.
- En el estado de apagado, también puede mantener presionado el botón de encendido para ajustar la posición a la posición predeterminada.

**Nota:** Para evitar un error de operación durante el estado de trabajo, al presionar el botón de encendido durante menos de dos segundos no cambia la operación.

## Localización y corrección de fallas

**ADVERTENCIA:** Tenga mucho cuidado con los niños. Su sillón no debe estar accesible al juego de los niños.

**Nota:** Si tiene problemas inesperados con su sillón de masaje, desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo. Si sigue teniendo problemas, como códigos de error, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de al 1-877-467-4289 o visite el sitio [www.insigniaproducts.com..](http://www.insigniaproducts.com..)

CÓDIGO DE ERROR	PROBLEMA	SOLUCIÓN
E1 01	El interruptor de arriba y abajo de la mano de masaje ha funcionado mal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el arnés de cables del interruptor de desplazamiento esté conectado correctamente.</li> <li>• Si el arnés de cables está bien, reemplace el interruptor de desplazamiento.</li> </ul>
E1 02	El panel de detección de círculos ha funcionado mal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el arnés de cables correspondiente esté conectado correctamente.</li> <li>• El panel de detección de círculos no está recibiendo una señal. Reemplace el panel.</li> <li>• El motor de subida y bajada o el panel de control están dañados. Reemplace el motor o el panel.</li> </ul>



<b>CÓDIGO DE ERROR</b>	<b>PROBLEMA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
E1 04	El movimiento de arriba y abajo ha sido prolongado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que su fuente de alimentación es de 110-120 V ~ 60 Hz. Apague su sillón y vuélvalo a encender.</li> </ul>
E1 08	El motor de subir y bajar está sobrecargado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apague su sillón y vuélvalo a encender.</li> <li>Asegúrese de que el motor y la caja de cambios funcionan bien. Reemplace el motor y la caja de cambios, si es necesario.</li> </ul>
E1 10	El motor de subir y bajar ha funcionado mal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el motor de subir y bajar o el controlador del panel.</li> </ul>
E2 01	El motor de amasar está sobrecargado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el motor de amasado.</li> </ul>
E2 02	El motor de amasado no puede detectar el ancho de amasado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el panel de detección de ancho.</li> </ul>
E3 01	El motor para los golpecitos está sobrecargado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el motor de los golpecitos.</li> </ul>
E5 01	El motor del rodillo de pie está sobrecargado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el motor del rodillo para el pie.</li> </ul>
E6 01	La bomba de aire está sobrecargada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desenchufe el cable de alimentación, espera 30 segundos y vuelve a enchufarlo.</li> </ul>
E4 01	El motor del cilindro está sobrecargado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el motor del cilindro eléctrico.</li> </ul>
E7 01	El tubo de control de la calefacción está sobrecargado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el tubo de control de la temperatura. Reemplace el cable calefactor.</li> </ul>

## Especificaciones

Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad)	38.4 × 29.5 × 64.6 pulg. (97.5 × 75 × 164 cm)
Peso	187.4 lb (85 kg)
Voltaje nominal	110 a 120 V ~ 6 Hz, 1.8 A
Tiempo de funcionamiento predeterminado	20 minutos
Potencia nominal	130 W
Cable de alimentación	6.8 pies (206 cm)
Cable del control remoto	6.2 pies (190 cm)

## Avisos legales

### Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

### Descripción:

El distribuidor\* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y empacado con esta declaración de garantía.

### ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

### ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

### ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

### ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

### ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

**1-877-467-4289**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

\* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

**[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)**

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V5 ESPAÑOL  
21-0435