



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Un par de parches de larga duración

Modelo: **PMLLPAD**



ESPAÑOL

(para uso con la unidad de electroTHERAPY pain relief de Omron)
Parches autoadhesivos con electrodos conectados a presión (98mm x 64mm)
www.OmronPainRelief.com

ÍNDICE

Guarde Estas Instrucciones	E3
Información De Seguridad.....	E4
Cómo Usar Los Parches	E6
Cómo Limpiar Los Parches.....	E8
Almacenamiento	E9

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar los parches.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Aplicación

Estos parches solo deben utilizarse para aplicar estimulación eléctrica con la unidad de Electrotherapy Pain Relief de Omron (PM3030) y aplicados sobre piel normal, saludable, seca y limpia de pacientes adultos únicamente.

- 1 sesión - 15 min. con apagado automático
- Máx. min. por sesión - 30 min. o 2 sesiones
- Máx. veces por día - 3 veces/día

⚠ No use estos parches para estimulación si tiene un marcapasos, desfibrilador implantado u otro dispositivo metálico o electrónico implantado. El uso bajo estas condiciones podría causar un choque eléctrico, quemaduras, interferencia electrónica o la muerte.

No coloque los parches:

- ⚠ Sobre el cuello porque esto podría causar espasmos musculares intensos y dar como resultado el cierre de sus vías respiratorias, dificultad en la respiración o efectos adversos en el ritmo cardíaco o la presión arterial.
- ⚠ A través del pecho porque la entrada de corriente eléctrica por su pecho podría causar alteraciones a su ritmo cardíaco, lo cual pudiera ser fatal.
- ⚠ Sobre heridas abiertas o erupciones, o sobre zonas o erupciones inflamadas, enrojecidas o infectadas de la piel (p.ej., flebitis, tromboflebitis, venas varicosas).
- ⚠ Sobre o cerca de lesiones cancerosas.
- ⚠ Sobre zonas de la piel que carecen de sensación normal.
- ⚠ En los lados opuestos de su cabeza ya que se desconoce el efecto de la estimulación al cerebro.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- ⚠ Para estimulación, si tiene un marcapasos, desfibrilador implantado u otro dispositivo metálico o electrónico implantado. El uso bajo estas condiciones podría causar un choque eléctrico, quemaduras, interferencia electrónica o la muerte.
- ⚠ El tamaño, la forma y el tipo de parches pueden afectar la seguridad y efectividad de la estimulación eléctrica.
- ⚠ Las características del funcionamiento eléctrico de los parches pueden afectar la seguridad y efectividad de la estimulación eléctrica.
- ⚠ Usar parches demasiado pequeños o que estén incorrectamente colocados podría causar incomodidad o quemaduras a la piel.

Precauciones

- Se desconocen los efectos del uso de parches para estimulación eléctrica a largo plazo.
- Ya que se desconoce el efecto de la estimulación al cerebro, los parches no deben ser colocados en los lados opuestos de su cabeza.
- Tenga precaución si los parches se aplican sobre zonas de la piel que carecen de sensación normal.

Reacciones adversas

- Puede que experimente irritación a la piel y quemaduras debajo de los parches aplicados a su piel si se utilizaron por más tiempo de lo indicado: 30 min/sesión, hasta 3 veces/día.
- Puede que experimente dolores de cabeza u otras sensaciones de dolor durante o después de aplicar estimulación eléctrica cerca de sus ojos o a su cabeza y cara.

CÓMO USAR LOS PARCHES

1. Retire y deseche la película plástica protectora de los parches.
2. Conecte cualquiera de los electrodos a cualquiera de los parches.
3. Coloque los parches solo sobre piel normal, intacta, seca, limpia y saludable.

Nota: Estos parches están destinados para ser utilizados por una sola persona. No comparta los parches con otras personas debido al riesgo de reacciones adversas de la piel y para prevenir la propagación de enfermedades.

CUÁNDO REEMPLAZAR LOS PARCHES

Si el parche ya no se adhiere a su piel o si más del 25% de la superficie del parche no está en contacto con su piel.

CÓMO LIMPIAR LOS PARCHES

1. Apague la unidad y retire el cable de cada parche.
 2. Lave los parches cuando el lado adhesivo se ensucie y/o los parches no se adhieran a su piel.
 3. Use las yemas de sus dedos para lavarlos delicadamente bajo agua fría.
- NO use esponjas, telas, detergentes, químicos o jabón.
 - Los parches se pueden lavar hasta 10 veces y usar hasta 150 veces.
 - Deje los parches secar al aire y NO los seque con papel o tela.

ALMACENAMIENTO

- No doble los parches.
- Entre usos, mantenga el cable conectado a los parches y coloque los parches en el portaparches con el lado adhesivo hacia abajo en cada lado del portaparches
- Enrolle el cable en el portaparches.
- Almacénelo en un lugar frío y seco, 5-40°C (41-104°F.), 30-40% de humedad relativa.
- Con un almacenamiento y uso adecuado, usted puede prolongar la duración de sus parches.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda,
llame al 1- 800-634-4350.

Fabricado por OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Hecho en Japón

Distribuido por: OMRON HEALTHCARE, INC.

1925 West Field Court

Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

© 2012 OMRON HEALTHCARE, INC.